
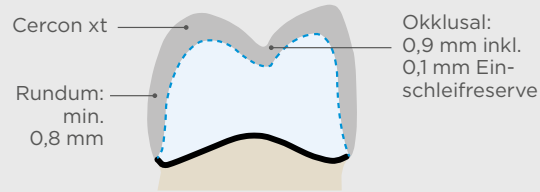


Anleitung für den Zahnarzt

Vollanatomisch ausgestalteter Zirkonoxid-Zahnersatz ermöglicht eine konservative Zahnpräparation

Klassische Präparation für Vollkeramikronen

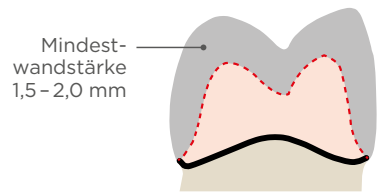



Konservative Präparation für vollanatomische Kronen



Oberkiefer, der von 13 - 23 (FDI/International) mit sechs Einzelkronen aus extra transluzentem Zirkonoxid Cercon xt versorgt wurde.

Vollanatomische Krone aus Cercon xt, die mit Universal Stain & Glaze bemalt und glasiert wurde.

Klassische Präparation für Vollkeramikbrücken

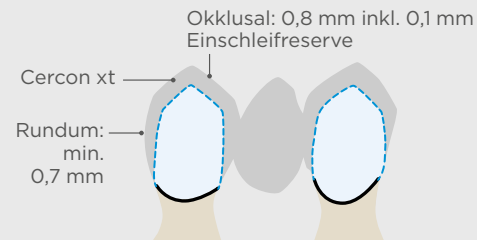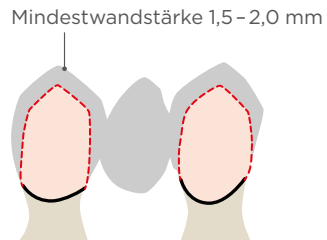

Konservative Präparation für vollanatomische Brücken



Oberkiefer, der von 25 - 26 (FDI/International) mit zwei Einzelkronen aus extra transluzentem Zirkonoxid Cercon xt versorgt wurde.

Vollanatomische Brücke aus Cercon xt, die mit Universal Stain & Glaze bemalt und glasiert wurde.

Befestigungsempfehlungen

Für Cercon®-Restaurationen mit ihrer umfassenden klinischen Erfolgsgeschichte gibt es eine Vielzahl von Befestigungssystemen, die dem Praktiker nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Eingliederung der definitiven Versorgung bieten.

Calibra® Ceram Adhesive Resin Cement

Für maximale Haftfestigkeit
Einfache Versäuberung

Calibra Ceram mit seiner hohen Haftfestigkeit steht für optimierte klinische Performance. Bei Verwendung des adhäsiven Universalzements Prime&Bond ist kein selbsthärtender Aktivator und kein Anmischen von Primer erforderlich.



Calibra® Universal Self-Adhesive Resin Cement

Einfach und universell
Einfache Versäuberung

Die Ein-Schritt-Zementierung ermöglicht bei vielen Indikationen den Verzicht auf einen zusätzlichen Ätz- oder Adhäsivschritt.



(Kunststoffmodifizierte) Glasionomerzemente

Der Einsatz von Glasionomerzementen und kunststoffmodifizierten Glasionomerzementen ist klinisch erprobt.

Polierempfehlungen*

• **EDenta** Ceramic Finishing Kit**
(30055SO)

• **Meisinger***
Diamantschleifer:**
27-76 µm (Komet** 837LF FG014)

Polymerisations- empfehlungen (Lampe)

• **Smartlite Focus**

* Beim Einschleifen von vollanatomischen Zirkonoxidrestaurationen ist stets mit Wasserkühlung zu arbeiten.

** EDenta, Meisinger® und Komet sind keine eingetragenen Marken von Dentsply Sirona.